



گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)
محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

Insopak®RU
Ready to use

اینسوپاک - آر یو
آماده مصرف

محلول ضد عفونی و پاک کننده ابزار و لوازم پزشکی و جراحی
بدون الکل



مزایا

- ضد عفونی کننده ابزار و وسایل پزشکی بدون الکل و آماده مصرف
- مناسب برای سطوح، ابزار و وسایل پزشکی حساس به الکل
- دارای طیف وسیع میکروب کشی و پایداری طولانی است.
- فاقد اثر خوردگی بر ابزار استیل و سازگار با بزار پلاستیکی و سیلیکونی
- بدون نیاز به آبکشی و سازگار با محیط زیست

کاربرد

محلول آماده مصرف پاک کننده و ضد عفونی کننده بطور اختصاصی برای ضد عفونی کردن سطوح کوچک و ابزار بیمارستانی شامل تخت بیمارستان، درب و دیوار اتاق عمل، میز و ترولی و دیگر ابزار پزشکی بدون نیاز به آبکشی مورد استفاده قرار می گیرد





گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

ترکیبات

هیدروژن پراکساید، پراستیک اسید، فسفریک اسید، و آب دیونیزه

طیف اثر بخشی

از بین برنده باکتریهای گرم مثبت و منفی، قارچ، مخمر، ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش

روش استفاده

ابتدا سطح مورد نظر را از آلودگی های قابل رویت پاک کرده سپس محلول را روی آن اسپری نمایید و یا سطح و ابزار را با دستمال آغشته به محلول ضد عفونی کننده اینسوپاک آر یو نمایید. پس از ۵ دقیقه سطح و ابزار مورد نظر ضد عفونی می گردد و نیاز به آبکشی ندارد.



تاییدیه ها

تولید مطابق دستورالعمل اتحادیه اروپا (EC) 648/2004 No، دارای مجوز از سازمان غذا و دارو، دارای تایید آزمایشگاه انستیتو پاستور ایران و موسسه متالورژی رازی

خصوصیات فیزیکی شیمیایی

Form	Liquid
Color	Clear & light green
pH	8.0 – 9.0
Density	0.95-0.98
Shelf life	18 Months

خصوصیات فنی

محلول آماده مصرف بدون نیاز به رقیق سازی با قابلیت استفاده بصورت مستقیم و اسپری دارای اثر ضد میکروبی وسیع الطیف، ضد باکتری، قارچ، مخمر و ویروس های انولپ دار و بدون انولپ دارای فعالیت آنزیماتیک پاک کنندگی و ضد میکروبی مناسب برای ابزار استیل، پلاستیکی و سیلیکونی حساس به حرارت فاقد فنل، آلدهید و فاقد اثر تثبیت خون و پروتئین بدون نیاز به آبکشی و دوستدار محیط زیست

هشدارها

فقط برای مصرف ابزار و سطوح است. خوراکی نمی باشد در صورت بلع به پزشک مراجعه شود از تماس با زخم باز، غشاء مخاطی و چشم خودداری شود در صورت تماس با آب فراوان شستشو شود جهت کار با این ماده از دستکش استفاده شود از ترکیب با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود

شرایط نگهداری

درپوش ظرف بسته، در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد، دور از حرارت و نور مستقیم خورشید و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

بسته بندی در هر کارتن

حجم

۴ عدد	گالن ۵ لیتری
۱۰ عدد	گالن ۱ لیتری
۲۰ عدد	بطری ۷۵۰ میلی لیتری

