



گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

Insopak®MA
Medium Level

اینسوپاک - ام آ

سطح متوسط

کنسانتره ضد عفونی کننده و پاک کننده
مخصوص ابزار پزشکی، جراحی و بیهوشی



مزایا

- کنسانتره ضد عفونی کننده و پاک کننده سطح متوسط ابزار و وسایل پزشکی
- بدون الکل مناسب برای ابزار و وسایل پزشکی حساس به الکل
- دارای طیف وسیع میکروب کشی و پایداری طولانی
- مناسب برای استفاده در حمام اولتراسونیک مناسب
- فاقد فنل، آلدهید و فاقد اثر تثبیت خون و پروتئین
- فاقد اثر خوردگی و سازگار با ابزار استیل و مواد غیر فلزی پلاستیکی و سیلیکونی

کاربرد

اینسوپاک ام آ برای ضد عفونی کردن ابزار پزشکی و وسایل استیل در مراکز بیمارستانی، دندانپزشکی و تولیدی بصورت روش غوطه وری تا ۵۰ برابر رقیق سازی (۲٪) مورد استفاده قرار می گیرد.





گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

ترکیبات

آلکیل آمین، کوکوپروپیلن دیامین، فرگرانس و آب دیونیزه

طیف اثر بخشی

از بین برنده باکتریهای گرم مثبت و منفی، قارچ، مخمر، ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش

روش استفاده

ابتدا محلول غلیظ را با رقت ۲ درصد در وان مخصوص رقیق نمایید (۲۰ میلی لیتر محلول در یک لیتر آب) سپس ابزار را از آلودگی های قابل رویت پاک کرده و داخل محلول غوطه ور نمایید بطوری که کلیه قسمتهای ابزار در داخل محلول قرار گیرد. پس از ۱۵ دقیقه ابزار را خارج نمایید و با آب مقطر آبکشی نمایید.

خصوصیات فیزیکوشیمیایی

Form	Liquid
Color	Clear & light Green
pH	7.0 – 9.0
Density	0.98-0.99
Shelf life	24 Months

خصوصیات فنی

محلول غلیظ ضد عفونی کننده پاک کننده بطور همزمان دارای اثر ضد میکروبی وسیع الطیف، ضد باکتری، قارچ، مخمر و ویروس های انولپ دار و بدون انولپ دارای مواد جلوگیری کننده از اثر خوردگی بر روی فلزات مناسب برای ابزار استیل، پلاستیکی و سیلیکونی حساس به حرارت فاقد بخارات اسیدی و قابل استفاده در حمام اولتراسونیک فاقد فنل، آلدهید و فاقد اثر تثبیت خون و پروتئین در شرایط عادی قابل استفاده تا ۲ هفته سازگار با محیط زیست و دارای بوی مطبوع

هشدارها

فقط برای مصرف ابزار و سطوح است. خوراکی نمی باشد در صورت بلع به پزشک مراجعه شود از تماس با زخم باز، غشاء مخاطی و چشم خودداری شود در صورت تماس با آب فراوان شستشو شود جهت کار با این ماده از دستکش استفاده شود از ترکیب با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود

شرایط نگهداری

درپوش ظرف بسته، در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد، دور از حرارت و نور مستقیم خورشید و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



تاییدیه ها

تولید مطابق دستورالعمل اتحادیه اروپا (EC) 648/2004 No، دارای مجوز از سازمان غذا و دارو، دارای تایید آزمایشگاه انستیتو پاستور ایران و موسسه متالورژی رازی

بسته بندی در هر کارتن

حجم

۴ عدد	گالن ۵ لیتری
۲۰ عدد	گالن ۱ لیتری

