



گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

Insopak®HE
High Level

اینسوپاک - اچ ای
سطح بالا

محلول ضد عفونی کننده و پاک کننده سطح بالا
مخصوص آندوسکوپ و ابزار حساس به دما



مزایا

- ضد عفونی کننده و پاک کننده سطح بالا برای آندوسکوپ و وسایل پزشکی حساس به دما
- محلول آماده مصرف با اثر قوی پاک کننده و ضد عفونی کننده همزمان
- فرموله شده بر مبنای ماده شیمایی کلوتار آلدئید و سورفکتانت اختصاصی
- دارای طیف وسیع میکروب کشی و پایداری طولانی
- مناسب برای ابزار استیل، پلاستیکی و سیلیکونی حساس به حرارت
- فاقد فنل دارای اثر از بین برنده خون و ترشحات
- دارای مواد جلوگیری کننده از اثر خوردگی بر روی فلزات

کاربرد

اینسوپاک اچ ای، محلول ضد عفونی کننده سطح بالا مخصوص آندوسکوپ و ابزار حساس به دما و ابزار پزشکی در مراکز بیمارستانی و دندانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.





گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

ترکیبات

گلو تار آلدئید، سورفکتانت، مواد جانبی و آب دیونیزه

طیف اثر بخشی

از بین برنده باکتریهای گرم مثبت و منفی، قارچ، مخمر، ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش

روش استفاده

ابتدا ابزار را از آلودگی های قابل رویت پاک کرده و سپس محلول اینستروپاک اچ جی را در داخل وان ضد عفونی پر کرده و ابزار را در داخل محلول غوطه ور نمایید بطوری که کلیه قسمتهای ابزار در داخل محلول قرار گیرد. پس از ۱۰ دقیقه ابزار را خارج نمایید و با آب مقطر آبکشی نمایید

خصوصیات فیزیکی شیمیایی

Form	Liquid
Color	Clear & light yellow
pH-value (20 °C)	7.0 – 9.0
Density	0.98-0.99
Shelf life	24 Months

خصوصیات فنی


محلول آماده مصرف با اثر قوی پاک و ضد عفونی کننده همزمان دارای اثر ضد میکروبی وسیع الطیف، ضد باکتری، قارچ، مخمر و ویروس های انولپ دار و بدون انولپ دارای مواد جلوگیری کننده از اثر خوردگی بر روی فلزات مناسب برای ابزار استیل، پلاستیکی و سیلیکونی حساس به حرارت فاقد فنل دارای اثر از بین برنده خون و ترشحات در شرایط عادی تا ۳ هفته پس از باز شدن قابل استفاده است

هشدارها

در محیط با تهویه مناسب نگهداری شود جهت کار با این ماده از دستکش استفاده شود برای ضد عفونی کردن اندوسکوپ و دیگر ابزار حساس به دما. خوراکی نمی باشد در صورت بلع به پزشک مراجعه شود از تماس با زخم باز، غشاء مخاطی و چشم خودداری شود در صورت تماس با آب فراوان شستشو شود جهت کار با این ماده از ماسک و دستکش استفاده شود از ترکیب با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود

شرایط نگهداری

درپوش ظرف بسته، در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد، دور از حرارت و نور مستقیم خورشید و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

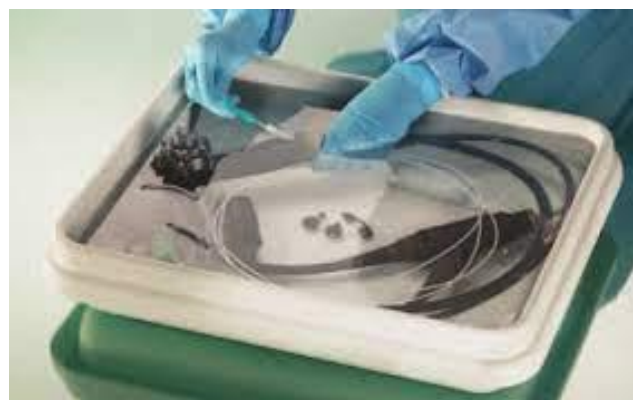

تاییدیه ها

تولید مطابق دستورالعمل اتحادیه اروپا (EC) 648/2004.No دارای مجوز از سازمان غذا و دارو، دارای تایید آزمایشگاه انستیتو پاستور ایران و موسسه متالورژی رازی

بسته بندی در هر کارتن

حجم

۴ عدد	گالن ۵ لیتری
۲۰ عدد	گالن ۱ لیتری

