



گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)
محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

Insopak®HP
High Level

اینسوپاک - اچ پی

سطح بالا

محلول ضد عفونی کننده و پاک کننده سطح بالا
مخصوص ابزار و لوازم حساس پزشکی



مزایا

- ضد عفونی کننده و پاک کننده سطح بالا ابزار و وسایل حساس پزشکی
- آماده مصرف بدون نیاز به رقیق سازی
- فرموله شده بر مبنای دو ماده ضد عفونی کننده قوی پراستیک اسید و هیدروژن پراکساید
- دارای طیف وسیع میکروب کشی و پایداری طولانی
- فاقد فنل، آلدهید و فاقد اثر تثبیت خون و پروتئین
- فاقد اثر خوردگی و سازگار با ابزار استیل و مواد غیر فلزی پلاستیکی و سیلیکونی

کاربرد

اینسوپاک-اچ پی برای ضد عفونی کردن ابزار و وسایل حساس پزشکی در مراکز بیمارستانی و دندانپزشکی بصورت مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد.





گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

خصوصیات فیزیکی شیمیایی

Form	Liquid
Color	Clear & Colorless
pH	2.0 – 3.0
Density	0.99-1.1
Shelf life	18 Months

خصوصیات فنی

محلول آماده مصرف است و نیازی به رقیق سازی ندارد. دارای اثر ضد میکروبی وسیع الطیف، ضد باکتری، قارچ، مخمر و ویروس های انولپ دار و بدون انولپ و توپر کلوزیس دارای مواد جلوگیری کننده از اثر خوردگی بر روی فلزات مناسب برای ابزار استیل، پلاستیکی و سیلیکونی حساس به حرارت فاقد فنل و آلدهید و دارای اثر پاک کنندگی خون و پروتئین سازگار با محیط زیست و قابلیت تجزیه پذیری بالا در محیط در شرایط عادی قابل استفاده تا ۲ هفته

هشدارها

در محیط با تهویه مناسب نگهداری شود جهت کار با این ماده از دستکش استفاده شود برای ضد عفونی کردن اندوسکوپ و دیگر ابزار حساس به دما. خوراکی نمی باشد در صورت بلع به پزشک مراجعه شود از تماس با زخم باز، غشاء مخاطی و چشم خودداری شود در صورت تماس با آب فراوان شستشو شود جهت کار با این ماده از ماسک و دستکش استفاده شود از ترکیب با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود

شرایط نگهداری

درپوش ظرف بسته، در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد، دور از حرارت و نور مستقیم خورشید و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

ترکیبات

پراستیک اسید، هیدروژن پراکساید، سورفکتانت و آب دیونیزه

طیف اثر بخشی

از بین برنده باکتریهای گرم مثبت و منفی، قارچ، مخمر، ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش

روش استفاده

ابتدا ابزار را از آلودگی های قابل رویت پاک کرده و سپس محلول اینسوپاک اچ پی را در داخل وان ضد عفونی پر کرده و ابزار را در داخل محلول غوطه ور نمایید بطوری که کلیه قسمتهای ابزار در داخل محلول قرار گیرد. پس از ۱۰ دقیقه ابزار را خارج نمایید و با آب مقطر ابکشی نمایید.



تاییدیه ها

تولید مطابق دستورالعمل اتحادیه اروپا (EC) 648/2004 No، دارای مجوز از سازمان غذا و دارو، دارای تایید آزمایشگاه انستیتو پاستور ایران و موسسه متالورژی رازی

بسته بندی در هر کارتن

حجم

۴ عدد

گالن ۵ لیتری

۲۰ عدد

گالن ۱ لیتری

