



گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

Dentapak® Immerse
Concentrate

دنتا پاک - ایمرس
کنسانتره

مخصوص ضد عفونی ابزار دندانپزشکی و اجزای قالب گیری
با روش غوطه وری



مزایا

- محلول کنسانتره با خاصیت ضد عفونی و پاک کنندگی همزمان برای اجزای قالب گیری و ابزار دندانپزشکی
- بر پایه ماده شیمیایی آلکیل آمین و بنزالکونیوم کلراید
- دارای طیف گسترده از بین برنده باکتری ها، قارچ ها و ویروس های انولپ دار و بدون انولپ
- مناسب برای ضد عفونی ابزار و اجزای قالب گیری و مواد غیر فلزی، پلاستیکی، آلزینات و سیلیکون
- فاقد اثر خوردگی، فاقد اثر رنگبری، فاقد اثر تثبیت خون و پروتئین
- فاقد بخارات اسیدی و قابل استفاده در حمام اولتراسونیک
- فاقد فتل، آلدئید و سازگار با محیط زیست و بدون اثر نامطلوب

کاربرد

دنتا پاک ایمرس برای ضد عفونی ابزار قالب گیری دندانپزشکی و دیگر لوازم با روش غوطه وری مورد استفاده قرار می گیرد.





گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

خصوصیات فیزیکی شیمیایی

Form	Liquid
Color	Clear & light yellow
pH	8.5 – 11.0
Density	0.99-1.09
Shelf life	24 Months

ترکیبات

آلکیل آمین، بنزالکونیوم کلراید، سورفکتانت و آب دیونیزه

طیف اثر بخشی

از بین برنده باکتریهای گرم مثبت و منفی، قارچ، مخمر، ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش

روش استفاده

ابتدا محلول غلیظ دنتا پاک ایمرس را با رقت یک درصد در وان مخصوص تهیه نمایید (۱۰ میلی لیتر محلول در یک لیتر آب) سپس ابزار قالب گیری را در داخل محلول غوطه ور نمایید بطوری که کلیه قسمت‌های آن داخل محلول قرار گیرد. پس از ۱۰ دقیقه آنرا خارج نمایید و با آب شیر ابکشی نمایید. ترجیحا اولین بار سازگاری مواد را با محلول ضد عفونی کننده امتحان نمایید

خصوصیات فنی

محلول غلیظ با خاصیت ضد عفونی و پاک کنندگی همزمان بر پایه آلکیل آمین، بنزالکونیوم کلراید دارای مواد جلوگیری کننده از اثر خوردگی بر روی فلزات مناسب برای ابزار استیل، پلاستیکی و سیلیکونی حساس به حرارت فاقد بخارات اسیدی و قابل استفاده در حمام اولتراسونیک فاقد فنل، آلدئید و فاقد اثر تثبیت خون و پروتئین دارای مجوز از وزارت بهداشت - سازمان غذا و دارو

هشدارها

جهت کار با این ماده از دستکش استفاده شود خوراکی نمی باشد در صورت بلع به پزشک مراجعه شود از تماس با زخم باز، غشاء مخاطی و چشم خودداری شود در صورت تماس با آب فراوان شستشو شود از ترکیب با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود

شرایط نگهداری

درپوش ظرف بسته، در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد، دور از حرارت و نور مستقیم خورشید و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



تاییدیه ها

تولید مطابق دستورالعمل اتحادیه اروپا (EC) 648/2004 No، دارای مجوز از سازمان غذا و دارو، دارای تایید آزمایشگاه انستیتو پاستور ایران و موسسه متالورژی رازی

بسته بندی در هر کارتن

حجم

۴ عدد	گالن ۵ لیتری
۱۰ عدد	گالن ۲ لیتری
۲۰ عدد	گالن ۱ لیتری

