



گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

**Dentapak® Suction**  
Concentrate

**دنتا پاک – ساکشن**  
کنسانتره

کنسانتره ضد عفونی کننده و پاک کننده  
مخصوص یونیت ساکشن دندانپزشکی



#### مزایا

- محلول کنسانتره با خاصیت ضد عفونی و پاک کنندگی همزمان مخصوص ساکشن دندانپزشکی
- بر پایه ماده شیمایی بنزالکونیوم کلراید، DDAC و سورفکتانت اختصاصی
- دارای طیف گسترده از بین برنده باکتری ها، قارچ ها و ویروس های انولپ دار و بدون انولپ
- مناسب برای ضد عفونی ابزار و اجزای قالب گیری و مواد غیر فلزی، پلاستیکی، آلزینات و سیلیکون
- فاقد اثر خوردگی بر فلزات و سازگار با انواع ساکشن و مواد غیر فلزی پلاستیکی و سیلیکونی
- دارای توانایی پاک کردن باقیمانده خون و بزاق و دیگر عوامل پروتئینی و غیر پروتئینی در تیوب
- فاقد فتل، آلدئید و فاقد اثر تثبیت خون و پروتئین

#### کاربرد

دنتا پاک – ساکشن برای ضد عفونی کردن ساکشن و متعلقات مربوطه فرموله شده که در مراکز بیمارستانی و دندانپزشکی استفاده می شود





## گروه داروسازی بایرل فناور (دانش بنیان)

### محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

#### خصوصیات فیزیکی شیمیایی

Form	Liquid
Color	Clear & light yellow
pH	9 – 12
Density	1.0 -1.09
Shelf life	24 Months

#### ترکیبات

بنزالکونیوم کلراید، آمونیوم کلراید، سورفکتانت، EDTA و آب دیونیزه.

#### طیف اثر بخشی

دارای اثر ضد میکروبی وسیع الطیف، ضد باکتری، قارچ، مخمر و ویروس های انولپ دار و بدون انولپ

#### روش استفاده

ابتدا محلول غلیظ را تا رقت ۲ درصد در ظرف مخصوص رقیق نمایید (۲۰ میلی لیتر محلول در یک لیتر آب) سپس حداقل در هر نوبت ۱/۵ لیتر برای ضد عفونی و پاک کردن ساکشن برای هر یونیت استفاده نمایید. برای ضد عفونی کاسه آسپیتون مقدار ۵۰۰ میلی لیتر از محلول ۲ درصد در آن بریزید و پس از ۱۵ دقیقه آبکشی کنید

#### خصوصیات فنی

بصورت محلول رقیق شده ۲ درصد مورد استفاده قرار می گیرد. محلول غلیظ ضد عفونی کننده پاک کننده بطور همزمان دارای مواد جلوگیری کننده از اثر خوردگی بر روی فلزات مناسب برای ابزار استیل، پلاستیکی و سیلیکونی حساس به حرارت فاقد فنل، آلدهید و فاقد اثر تثبیت خون و پروتئین دارای مجوز از وزارت بهداشت - سازمان غذا و دارو

#### هشدارها

جهت کار با این ماده از دستکش استفاده شود خوراکی نمی باشد در صورت بلع به پزشک مراجعه شود از تماس با زخم باز، غشاء مخاطی و چشم خودداری شود در صورت تماس با آب فراوان شستشو شود از ترکیب با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود

#### شرایط نگهداری

درپوش ظرف بسته، در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد، دور از حرارت و نور مستقیم خورشید و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



#### تاییدیه ها

تولید مطابق دستورالعمل اتحادیه اروپا (EC) 648/2004 No. دارای مجوز از سازمان غذا و دارو، دارای تایید آزمایشگاه انستیتو پاستور ایران و موسسه متالورژی رازی

#### بسته بندی در هر کارتن

#### حجم

۴ عدد	گالن ۵ لیتری
۱۰ عدد	گالن ۲ لیتری
۲۰ عدد	گالن ۱ لیتری

