



گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)  
محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

**Dentapak®Quik**  
Ready to use

**دنتا پاک – کوئیک**  
بر پایه الکل – تأثیر فوری

محلول ضد عفونی کننده مخصوص توربین و اجزای آن



#### مزایا

- محلول آماده مصرف با اثر فوری برای ابزار دندانپزشکی بدون نیاز به آبکشی
- حاوی دو نوع الکل و سورفکتانت با زمان اثر بخشی حدود ۳۰ ثانیه
- دارای طیف گسترده از بین برنده باکتری ها، قارچ ها و ویروس های انولپ دار و بدون انولپ
- مناسب برای ضد عفونی توربین و اجزا آن و ابزار دندانپزشکی مقاوم به الکل
- دارای مواد جلوگیری کننده از اثر خوردگی بر روی فلزات
- فاقد فنل، آلدئید و کلر
- سازگار با محیط زیست و بدون اثر نامطلوب

#### کاربرد

دنتاپاک کوئیک برای ضد عفونی کردن توربین و ابزار مختلف دندانپزشکی مقاوم به الکل در مراکز دندانپزشکی بصورت اسپری، مستقیم و یا با استفاده از دستمال آغشته به محلول که نیاز به ضد عفونی سریع دارند مورد استفاده قرار می گیرد.





## گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

### خصوصیات فیزیکوشیمیایی

Form	Liquid / Spray
Color	Clear & colorless
pH	4.0 - 6.0
Density	0.92-0.95
Shelf life	24 Months

### ترکیبات

الکل اتانول، ان-پروپانول، سورفکتانت و آب دیونیزه

### طیف اثر بخشی

از بین برنده باکتریهای گرم مثبت و منفی، ویروسهای دارای پوشش دار و بدون پوشش (هپاتیت، انفلوانزا، کرونا) و قارچها

### روش استفاده

ابتدا رابط را به داخل محلول قرار دهید و تریگر را فشار دهید تا مایع ضد عفونی از سر ابزار خارج شود. ۵ دقیقه ادامه دهید تا مسیر کاملا پاک و ضد عفونی شود سپس رابط را از محلول ضد عفونی جدا و مجددا چند بار تریگر را فشار دهید تا مایع کاملا از ابزار خارج شود و با کمک باد مسیر خشک شود. بوسیله یک دستمال یکبار مصرف بخشهای بیرونی توربین را خشک نمایید. ابزار ضد عفونی گردیده است.

### خصوصیات فنی

محلول آماده مصرف بر پایه الکل اتانول، ان-پروپانول، با تاثیر فوری همراه با طیف گسترده اثر بخشی ضد باکتری، ویروس و قارچ

دارای طیف گسترده از بین برنده باکتری ها، قارچ ها و ویروس های انولپ دار و بدون انولپ

مناسب برای ضد عفونی کلیه ابزار پزشکی و وسایل مقاوم به الکل

فاقد فنل، آلدهید و کلرین

دارای مجوز از وزارت بهداشت - سازمان غذا و دارو

### هشدارها

فقط برای مصرف ابزار و سطوح غیر حساس به الکل است.

خوراکی نمی باشد در صورت بلع به پزشک مراجعه شود

از تماس با زخم باز، غشاء مخاطی و چشم خودداری شود در صورت

تماس با آب فراوان شستشو شود

جهت کار با این ماده از دستکش استفاده شود

از ترکیب با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود

### شرایط نگهداری

درپوش ظرف بسته، در دمای ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد، دور از

حرارت و نور مستقیم خورشید و دور از دسترس کودکان نگهداری

شود.

### تاییدیه ها

تولید مطابق دستورالعمل اتحادیه اروپا (EC) 648/2004 No، دارای

مجوز از سازمان غذا و دارو، دارای تایید آزمایشگاه انستیتو پاستور

ایران و موسسه متالورژی رازی



### بسته بندی در هر کارتن

### حجم

۴ عدد گالن ۵ لیتری

۱۰ عدد گالن ۱ لیتری

۲۰ عدد بطری ۷۵۰ سی سی

