



گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

Surfopak® CR
Concentrate

سارفوپاک - سی آر

محلول کنسانتره ضد عفونی و پاک کننده
برای سطوح بزرگ و قابل شستشو



مزایا

- کنسانتره ضد عفونی کننده بر پایه آمونیوم چهارتایی
- از بین برنده بیو فیلم میکروبی در سطوح بزرگ
- دارای طیف وسیع میکروب کشی و پایداری طولانی
- دارای خاصیت پاک کنندگی و ضد عفونی کنندگی همزمان
- مناسب برای سطوح بزرگ که قابلیت شستشو دارد
- دارای قابلیت رقیق سازی تا ۱۰۰ برابر و استفاده روتین در مراکز درمانی
- فاقد فنل و آلدهید

کاربرد

برای ضد عفونی کردن و از بین بردن بیو فیلم میکروبی در سطوح بزرگ در اماکن عمومی، تولیدی و بیمارستانی که قابلیت شستشو با آب را دارند مثل سطوح آشپزخانه ها، ظرفشویی، رستوران، استخر، حمام، سرویس های بهداشتی. مورد استفاده قرار می گیرد.





گروه داروسازی بایرل فناور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

خصوصیات فیزیکوشیمیایی

Form	Liquid
Color	Colorless
pH	8.0-8.5
Density	0.96-0.99
Shelf life	36 Months

خصوصیات فنی

مناسب سطوح بزرگ قابل شستشو
اثر همزمان پاک کنندگی و ضد عفونی کنندگی
تاثیر سریع، همراه با طیف گسترده اثر بخشی
اثر همزمان پاک کنندگی و ضد عفونی کنندگی
بدون ایجاد چسبندگی بر روی سطوح
قابل استفاده بر روی سطوح اپوکسی، سرامیکی و استیل
فاقد فنل و آلدهید

هشدارها

فقط برای مصرف سطوح است.

خوراکی نمی باشد در صورت بلع به پزشک مراجعه شود
از تماس با زخم باز، غشاء مخاطی و چشم خودداری شود در صورت
تماس با آب فراوان شستشو شود
جهت کار با این ماده از دستکش استفاده شود
از ترکیب با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود

شرایط نگهداری

در پوش ظرف بسته، در دمای ۴ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از
حرارت و نور مستقیم خورشید و دور از دسترس کودکان نگهداری
شود.

بسته بندی در هر کارتن

حجم

۴ عدد	گالن ۵ لیتری
۱۰ عدد	گالن ۱ لیتری

ترکیبات

دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید، بنزالکونیوم کلراید، PHMB و
آب دیونیزه

طیف اثر بخشی

اثر بخشی قوی بر علیه باکتری های گرم مثبت و منفی، ویروسهای
پوشش دار و بدون پوشش انواع قارچ مخمر و اسپورد در مدت ۱۰ دقیقه

روش استفاده

برای سطوح آلوده محلول کنسانتره سارفوپاک - سی آر را به نسبت
۱ درصد رقیق نمایید (۱۰ میلی لیتر در یک لیتر آب) و برای سطوح به
شدت آلوده محلول را به نسبت ۲ درصد رقیق نمایید (۲۰ میلی لیتر
در یک لیتر آب) به آرامی هم بزنید و بر روی سطح بریزید سپس با
تی و یا برس در تمام سطح پخش کنید به نحوی که تمام سطح
آغشته به محلول شود. پس از ۱۰ دقیقه اثربخشی کامل می شود،
سپس محل را آبکشی نمایید. سطح تمیز و عاری از هرگونه میکروب
شده است.

مکان مصرف	غلظت	زمان دقیقه	مقدار
سطوح بیمارستانی	2%	15	20 ml/L
سالنهای تولید	1%	10	10 ml/L
سطوح عمومی روزانه	1%	10	10 ml/L



تاییدیه ها

تولید مطابق دستورالعمل اتحادیه اروپا (EC) 648/2004 No، دارای مجوز
از سازمان غذا و دارو، دارای تایید آزمایشگاه انستیتو پاستور ایران و
موسسه متالورژی رازی

