



گروه داروسازی بایرل فنور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

Surfopak® CN
Concentrate

سارفوپاک - سی ان

محلول کنسانتره ضد عفونی و پاک کننده
برای سطوح بزرگ بدون نیاز به آبکشی



مزایا

- کنسانتره ضد عفونی کننده بر پایه آمونیوم چهار تایی و سورفکتانت غیر یونی
- دارای خاصیت قوی ضد میکربی و ضد اسپور با پایداری طولانی
- مناسب برای سطوح بزرگ که قابلیت شستشو ندارد
- دارای خاصیت پاک کنندگی و ضد عفونی کنندگی همزمان
- دارای قابلیت رقیق سازی تا ۱۰۰ برابر و استفاده روتین در مراکز درمانی
- فاقد فنل و آلدهید

کاربرد

بطور اختصاصی برای تمیز و ضد عفونی کردن سطوح بزرگ که قابلیت آبکشی ندارد همچون مراکز درمانی، اتاق عمل، آزمایشگاه، سالن تولید داروسازی، سالنهای ورزشی، هتل و غیره مورد استفاده قرار می گیرد. پس از استفاده بدون نیاز به آبکشی سطوح را کاملا تمیز و ضد عفونی نموده و هیچ بو و اثر نا مطلوب در محل باقی نمی گذارد.





گروه داروسازی بایرل فناور (دانش بنیان)

محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

خصوصیات فیزیکی شیمیایی

Form	Liquid
Color	Colorless
pH	8.8-9.5
Density	0.96-0.99
Shelf life	36 Months

ترکیبات

دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید، آلکیل بنزیدیل دی متیل آمونیوم کلراید، سورفکتانت غیر آنیونی و آب دیونیزه

طیف اثر بخشی

اثر بخشی قوی بر علیه باکتری های گرم مثبت و منفی، ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش انواع قارچ مخمر و اسپورد در مدت ۱۰ دقیقه

روش استفاده

محلول ضد عفونی سارفوپاک-سی دی را برای سطوح آلوده به نسبت ۱ درصد رقیق نمایید (۱۰ میلی لیتر در یک لیتر آب) و برای سطوح به شدت آلوده به نسبت ۲ درصد رقیق نمایید (۲۰ میلی لیتر در یک لیتر آب) سپس محلول را بر روی سطح پخش کنید و یا اسپری نمایید به نحوی که تمام سطح آغشته به محلول شود. پس از ۱۰ دقیقه بدون نیاز به آبکشی سطح را تی یا دستمال بکشید. سطح کاملاً ضد عفونی و عاری از هرگونه میکروب شده است.

خصوصیات فنی

مناسب سطوح بزرگ بدون نیاز به آبکشی
اثر همزمان پاک کنندگی و ضد عفونی کنندگی
تأثیر سریع، همراه با طیف گسترده اثر بخشی
بدون ایجاد چسبندگی بر روی سطوح
قابل استفاده بر روی سطوح اپوکسی، سرامیکی و استیل
فاقد فنل و آلدهید

هشدارها

فقط برای مصرف سطوح است.

خوراکی نمی باشد در صورت بلع به پزشک مراجعه شود
از تماس با زخم باز، غشاء مخاطی و چشم خودداری شود در صورت تماس با آب فراوان شستشو شود
جهت کار با این ماده از دستکش استفاده شود
از ترکیب با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود

شرایط نگهداری

درپوش ظرف بسته، در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، دور از حرارت و نور مستقیم خورشید و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

مکان مصرف	غلظت	زمان دقیقه	مقدار
سطوح بیمارستانی	2%	15	20 ml/L
سالنهای تولید	1%	10	10 ml/L
سطوح عمومی روزانه	1%	10	10 ml/L



تاییدیه ها

تولید مطابق دستورالعمل اتحادیه اروپا (EC) 648/2004 No، دارای مجوز از سازمان غذا و دارو، دارای تایید آزمایشگاه انستیتو پاستور ایران و موسسه متالورژی رازی

حجم

بسته بندی در هر کارتن

۴ عدد

گالن ۵ لیتری

۱۰ عدد

گالن ۱ لیتری

