



سارفوپاک-آر یو

Surfopak-RU

(Ready to Use)

گروه داروسازی بایرپل فناور (دانش بنیان)
محصولات ضد عفونی کننده میکروپاک

مزایا

- محلول ضد عفونی کننده آنزیماتیک
- بر پایه آنزیم هیدروژن پراکساید
- مناسب برای سطوح بیمارستانی و پزشکی حساس به الکل
- آماده مصرف- بدون نیاز به آبکشی
- سرعت عمل بالا در خشک شدن و بدون ایجاد لک یا باقی مانده
- فاقد فنول، آلدهید و کلرین



کاربرد

سارفوپاک آر یو محلول ضد عفونی کننده آنزیماتیک با فرمولاسیون پیشرفته بر پایه هیدروژن پراکساید، پراستیک اسید و سورفکتانت های اختصاصی به صورت آماده مصرف فرموله شده است تا بدون نیاز به رقیق سازی، بطور مستقیم و با اطمینان بالا استفاده شود. سارفوپاک آر یو با اثر بخشی قوی و پایدار، برای استفاده در نواحی پرتردد مانند اتاق های بستری، بخش های ویژه، اورژانس و ترولی های درمانی و سطوحی که به الکل حساس هستند مناسب می باشد.



هیدروژن پراکساید و پراستیک اسید هردو ترکیبات اکسنده قوی هستند که با تولید رادیکال های آزاد اکسیژن، موجب تخریب ساختارهای حیاتی سلول میکروارگانیسم ها از جمله پروتئین ها، لیپیدهای غشایی و مواد ژنتیکی می شوند. این ترکیب دوگانه باعث تخریب سریع و کامل طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها شامل باکتری های مقاوم، قارچ ها، اسپورها و ویروس ها می گردد. پراستیک اسید نفوذپذیری بالا و پایداری در حضور مواد آلی دارد، در حالی که هیدروژن پراکساید با آزادسازی آهسته رادیکال ها، اثربخشی پایدار را تضمین می کند. این محصول با مکانیسم اثر، آنزیماتیک به شکلی مؤثر و سریع ساختارهای آلی و پاتوژن ها را تخریب و غیرفعال می کند، بدون آنکه آسیبی به سطوح حساس وارد نماید.

روش استفاده

ابتدا سطح مورد نظر را از آلودگی های قابل رویت پاک کرده سپس محلول سارفوپاک آر یو را روی آن اسپری نمایید و یا بوسیله یک دستمال تمیز آغشته به محلول سطح مورد نظر را دستمال کشی نمایید. پس از خشک شدن، سطح کامل ضدعفونی گردیده است و نیاز به آبکشی ندارد.

خصوصیات فیزیکوشیمیایی

Form	Liquid
Color	Clear & Colorless
(pH-value) 20°C	3-4
Density	0.95-0.98
Shelf life	24 Month

نکات فنی و ایمنی

فقط برای مصرف سطوح است و خوراکی نمی باشد.
در صورت بلع به پزشک مراجعه شود.
از تماس با زخم باز، غشاء مخاطی و چشم خودداری شود در صورت تماس، با آب فراوان شستشو شود.
از ترکیب با مواد شیمیایی دیگر خودداری شود.
جهت کار با این محصول از ماسک و دستکش استفاده گردد.
درپوش ظرف بسته، درمحیط با تهویه مناسب و در دمای ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد، دور از حرارت و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

تایبیدیه ها

تولید مطابق دستورالعمل اتحادیه اروپا (EC 648/2004) (No 648/2004)
مطابق با استانداردهای EN 10504 و EN 19851
دارای مجوز از سازمان غذا و دارو
دارای تایید مجموعه آزمایشگاه های تخصصی ویرومد، همکار سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی
دارای تاییدیه اثر ضد میکروبی از انستیتو پاستور ایران

طیف اثربخشی میکروبی منطبق با استانداردهای اروپایی

اثر بخشی علیه باکتری ها

According to EN 13727 (contact time: 1 minute):	- Staphylococcus aureus / ATCC 6538 - Escherichia coli / ATCC 10536 - Pseudomonas aeruginosa / ATCC 15442 - Enterococcus hirae / ATCC 10541
According to EN 14561 (contact time: 5 minutes):	- Staphylococcus aureus / ATCC 6538 - Pseudomonas aeruginosa / ATCC 15442 - Enterococcus hirae / ATCC 10541

اثر بخشی علیه مخمر

According to EN 13624 (contact time: 1 minute):	- Candida albicans / ATCC 10231
According to EN 14562 (contact time: 5 minutes):	- Candida albicans / ATCC 10231

اثر بخشی علیه قارچ

According to EN 13624 (contact time: 5 minutes):	- Aspergillus niger / ATCC 16404
According to EN 14562 (contact time: 5 minutes):	- Aspergillus niger / ATCC 16404

اثر بخشی علیه ویروس ها

According to EN 14476 (contact time: 3 minutes & 5 minutes):	- Herpes Simplex Virus (HSV-1) - Adenovirus Type 5
---	---

هیدروژن پراکساید 2%: عامل ضدعفونی کننده قوی
پراستیک اسید: عامل تقویت کننده اثر بخشی میکروبی و ضدعفونی کننده
سورفکتانت غیر یونی: به منظور افزایش اثربخشی ضدعفونی کننده
در تماس با سطوح پیچیده و آلوده
عامل اصلی جدا شدن چربی، پروتئین و آلودگی های آلی از سطح

کد محصول	بسته بندی در هر کارتن	حجم
5012045000	۴ عدد	گالن ۵ لیتری
5012042000	۶ عدد	گالن ۲ لیتری
5012041000	۱۰ عدد	گالن ۱ لیتری
501204750	۲۰ عدد	اسپری ۷۵۰ میلی لیتری